

Relatório técnico

De Calibração

e

Seg. Elétrica

Escopo de Calibração e Segurança Elétrica do Eletrocardiógrafo

1. Procedimentos de Calibração

A calibração verifica a precisão dos sinais registrados pelo eletrocardiógrafo e deve ser realizada periodicamente.

2. Parâmetros Verificados

- **Amplitude do sinal:** Verificação se 1 mV corresponde ao valor correto no traçado.
- **Frequência de resposta:** Teste da resposta do equipamento dentro da faixa de operação.
- **Velocidade do traçado:** Conferência das velocidades configuráveis, como 25 mm/s e 50 mm/s.
- **Verificação de ruído e interferência:** Teste para identificar ruídos que possam afetar a leitura.
- **Teste de integridade dos cabos e eletrodos:** Avaliação da continuidade e resistência elétrica dos acessórios.

3. Procedimentos de Segurança Elétrica

A segurança elétrica previne choques elétricos e interferências que possam comprometer a segurança do paciente e do operador.

4. Ensaios de Segurança Elétrica

- **Corrente de fuga para terra:** Medição para garantir que o equipamento não libera corrente perigosa.
- **Corrente de fuga para o paciente:** Verificação da segurança das derivações conectadas ao paciente.
- **Resistência de isolamento:** Teste da isolação entre os circuitos de entrada e o chassi.
- **Continuidade do aterramento:** Garantia de conexão segura ao aterramento.

5. Ferramentas e Equipamentos de Teste

- Simulador de ECG Digital
- Analisador de segurança elétrica

6. Periodicidade da Calibração e Testes de Segurança

- **Calibração:** Anualmente ou conforme necessidade.
- **Segurança elétrica:** A cada 12 meses ou após manutenção corretiva.

7. Registro e Certificação

Todos os testes devem ser documentados, e um certificado de calibração e laudo de segurança elétrica devem ser emitidos.

RC-ECG-RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDÍOGRAFO
Nº 2606081642

Data :	08/06/2026	Hora:	9:10	Sugestão próxima calibração:	08/06/2027
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo /			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	26	°C	Humidade relativa do ar:	63	%
Contratante:	CDC Centro de Diagnostico			Contato :	Telef.: (11) 3129-4730
Endereço:	R CORONEL XAVIER DE TOLEDO - LADO IMPAR			CEP:	10481-00 Cidade/UF: São Paulo
CPF/CNPJ:	15.582.510/0001-91			E-mail :	thiago2616@gmail.com

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Eletrocardiógrafo	Marca:	Micromed	Modelo:	Wincardio
Nº Série:	715721	Patrimônio:		Classe:	I
				Tipo:	C

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :
Simulador de Eletrocardiograma

Marca: R&D Mediq Modelo: Hand Sim - HS-14 Nº Serie: 9823049
 Certificado de calibração Nº: 400.17708/25 Data: 21/07/2025 Validade: 21/07/2026
 Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.

Termo Higrômetro

Marca: Minipa Modelo: MT-242 Nº Serie: Não consta
 Certificado de calibração nº: 400.17674/25 Data: 14/07/2025 Validade: 14/07/2026
 Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.

Amplitude (Medidas na derivação DIII do Equipamento sob ensaio) :	Esperado mm	Tolerância +ou- mm	Obtido mm	Situação
Função "D" do Simulador de ECG - Onda quadrada 1 mV 2 Hz :	10	1	10	Aprovado
Função "2" do Simulador de ECG - Sinal de ECG derivação DIII :	10	1	10	Aprovado

Frequência (Batimentos por minuto. bpm)	Esperado bpm	Tolerância %	Obtido bpm	Situação
Função "0" do simulador de ECG - Sinal de ECG 30 BPM :	30	5	30	Aprovado
Função "2" do simulador de ECG - Sinal de ECG 80 BPM :	80	5	80	Aprovado
Função "4" do simulador de ECG - Sinal de ECG 240 BPM :	240	5	240	Aprovado

Velocidade de registro :	Esperado mm	Tolerância %	Obtido mm	Situação
25 mm/seg. - Função "2" do Simulador (80BPM) ECG - 8 QRSs :	150 mm	5	150	Aprovado
50 mm/seg. - Função "0" do Simulador (30 BPM) ECG - 4 QRSs :	150 mm	5	150	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

**Wanderson
Ferreira CPF
354.274.038-17**

Assinado de forma digital
 por Wanderson Ferreira
 CPF 354.274.038-17
 Dados: 2026.06.05
 17:17:56 -03'00'

Técnico executor

Wanderson Ferreira-CPF: 354.374.038-17

**THIAGO CICERO
ALVES
JOSE:3343738980
7**

Assinado de forma digital
 por THIAGO CICERO
 ALVES JOSE:33437389807
 Dados: 2026.06.05
 17:18:13 -03'00'

Técnico responsável

Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176

Relatório de Teste

Modelo: Wincardio serial

Nro.de Série: 0715721

Data: 08/06/2026 Hora 09:00


PADRÃO UTILIZADO PARA AFERIÇÃO

Calibrador de ECG marca R&D Mediq modelo HS-14 N° de série: 9823049

Certificado de calibração n°: 400.17792/24 / CERTIFICADOR: CNCiso. Com.de Instrum. De Precisão Ltda.

Aplicada amplitude na derivação DIII do equipamento sob ensaio

Onda quadrada 1 mV 2 Hz

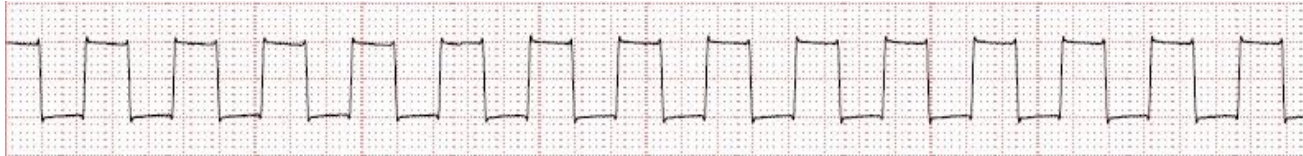

Sinal de ECG derivação DIII



Aplicada frequência (Batimentos por minuto. bpm) sob ensaio

Sinal de ECG 30 BPM



Sinal de ECG 80 BPM



Sinal de ECG 240 BPM




Aplicado velocidade de registro sob ensaio

25 mm/seg. - 8 QRSs Sinal de ECG 80 BPM



50 mm/seg. - 4 QRSs / Sinal de ECG 30 BPM

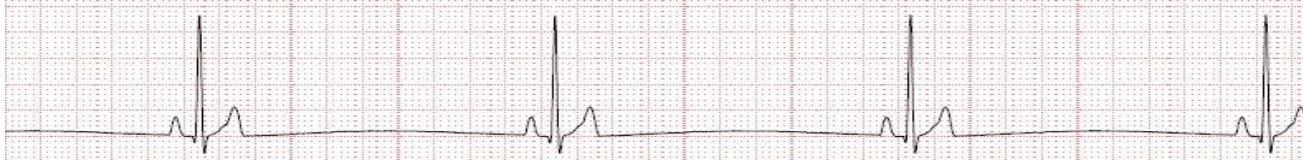

COMENTARIOS: REGISTROS APROVADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO FABRICANTE

CERTIFICADO DE SEGURANÇA ELÉTRICA				Nº 2606081642	
Data :	08/06/2026	Hora:	9:05	Sugestão próximo ensaio :	08/06/2027
Contratada: Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.				CNPJ: 47.577.523/0001-69	
Endereço: Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP				Insc.Est.: 110.554.143.117	
Temperatura ambiente:		26 °C		Humidade relativa do ar: 63 %	
Contratante: CDC Centro de Diagnostico				Contato : (11) 3129-4730	
Endereço: R CORONEL XAVIER DE TOLEDO 71				CEP: 10481-00 Cidade/UF: São Paulo	
CPF/CNPJ: 15.582.510/0001-91				E-mail: thiago2616@gmail.com	
EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)					
Equipamento: Eletrocardiógrafo		Marca: Micromed		Modelo: Wincardio	
Nº Série: 715721		Patrimônio:		Classe: I Tipo: CF	
Método Utilizado:					
Conforme solicitado, nosso laboratório realizou calibração no equipamento acima onde foram realizadas medições em três séries de três pontos (03 ciclos) pré determinados.					
PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :					
Analisador de segurança elétrica					
Marca: Fluke		Modelo: 601-Pro Series XL		Nº Serie: 9722028	
Certificado de calibração Nº: 400.17705/25		Data: 21/07/2025		Validade: 21/07/2026	
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
Termo Higrômetro					
Marca: Minipa		Modelo: MT-242		Nº Serie: Não consta	
Certificado de calibração nº: 400.17674/25		Data: 14/07/2025		Validade: 14/07/2026	
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO VAC (Rêde)			CORRENTE DE FUGA P/GABINETE (µA)		
L1(Fase)-Earth(Terra) VAC : 120.1 V			Obtido		
L2(Neutro)-Earth(Terra) VAC : 0.1 V			Máximo admissível		
L1(Fase) - L2(Neutro) Volts VAC : 120.1 V			Polaridade normal 0 100 Aprovado		
Consumo de corrente (A) : 0.0 A			Neutro desligado 0 500 Aprovado		
Resistência ao terra de proteção (Corrente aplicada = 10A)			Terra Desligado 10 500 Aprovado		
Máximo admissível Ω 0,200			Polaridade reversa 0 100 Aprovado		
Resistência encontrada Ω 0,196 Aprovado			Neutro desligado 0 500 Aprovado		
Isolação L1, L2-gabinete acima de XX Ω (2)hms			Terra Desligado 8 500 Aprovado		
Isol. parte aplicada-gabinete acima deXX Ω 0.1					
CORRENTE DE FUGA PARA O TERRA (µA)					
Polarid. Normal 1		Max. 500		Aprovado	
Sem L2(Neutro) 1		Max. 1000		Aprovado	
CORRENTE DE FUGA PARA O PACIENTE (µA)			REDE SOBRE PARTES APLICADAS (µA)		
Obtido			Obtido		
Máximo admissível			Máximo admissível		
Polaridade Normal 1 10 Aprovado			Pol. isolação normal 9 50 Aprovado		
Neutro desligado 1 50 Aprovado			Normal 10 50 Aprovado		
Terra desligado 1 50 Aprovado			Reversa 10 50 Aprovado		
Polaridade reversa 1 10 Aprovado			Normal 9 50 Aprovado		
Neutro desligado 1 50 Aprovado			Reversa 10 50 Aprovado		
Terra desligado 1 50 Aprovado					
CORRENTE AUXILIAR AO PACIENTE (µA)					
RA-Todos		RL-Todos		LA-Todos	
Obtido		Obtido		Obtido	
Máximo admissível		Máximo admissível		Máximo admissível	
Pol.Normal: 0 10		0 10		0 10	
Neutro desl.: 0 50		0 50		0 50	
Terra desl.: 0 50		0 50		0 50	
Pol.Reversa.: 0 10		0 10		0 10	
Neutro desl.: 0 50		0 50		0 50	
Terra desl.: 0 50		0 50		0 50	
APROVADO		APROVADO		APROVADO	
O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.					
Wanderson Ferreira Assinado de forma digital por Wanderson Ferreira CPF 354.274.038-17 Dados: 2026.06.08 10:13:24 -03'00' Técnico executor Wanderson Ferreira-CPF: 354.274.03717			THIAGO CICERO ALVES Assinado de forma digital por THIAGO CICERO ALVES JOSE:33437389807 Dados: 2026.06.08 10:13:42 -03'00' Técnico responsável Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176		